

BRUSHFLUID[©]


care & repair 4 all brushes

Die Lösung
The solution

Das Problem
The problem



Das Ergebnis
The result

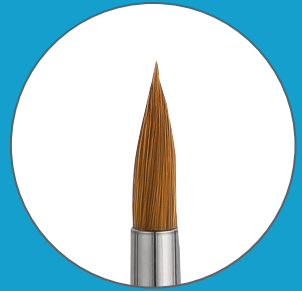

... und der Pinsel bleibt in Form
... and the brush stays in shape




1



BRUSHFLUID[®]
auf den sauberen
und trockenen Pinsel
applizieren und
einmassieren

*apply and massage
in **BRUSHFLUID**[®] on the
clean and dry brush*

2

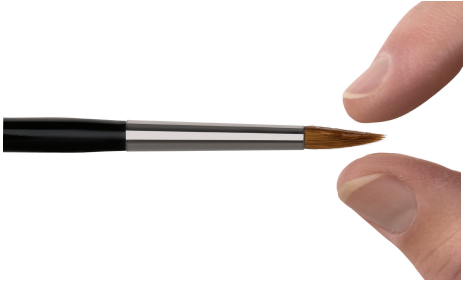

Pinselspitze formen
*shape **brush tip***

3



Pinsel horizontal
trocknen lassen

*allow **brush** to
dry horizontally*

4

H₂O



vor **nächster**
Benutzung
BRUSHFLUID[®]
entfernen

*remove
BRUSHFLUID[®]
before next use*



BRUSHFLUID[®] # BF-30

1 PE-Flasche/PE-bottle **30ml**

LABiONiQ
made in germany

Luitpoldstraße 9
D-86381 Krumbach

info@LABiONiQ.com | Tel +49(0)8282-827482
www.LABiONiQ.com | Fax +49(0)8282-827484



11-2023